

# MASQUES ALTERNATIFS LAVABLES ET REUTILISABLES A USAGE NON SANITAIRE

AFNOR SPEC S76-001

## NOTICE :

Domaine d'utilisation : Ce masque est non classifié est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). **Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.** Ce masque est destiné aux personnes ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes. Il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures. Laver le masque avant le premier usage.

Recommandations de manipulation des masques :

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;  
lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque ;
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
- si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
- pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le placer dans un bac en vue d'être lavé Ou le jeter dans une poubelle; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque : après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé au minimum 15 fois.

Composition de la matière principale : 100 % Polyester + entoilage 100 % polyamide

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière

<https://www.snof.org/sites/default/files/AFNORSPEC-S76-001-MasquesBarrieres-AnnexeC-patrons.pdf>